

## 7. Reinigung und Pflege

### 7.1 Sitz und Deckel

Sitz und Deckel können zur Reinigung mit einem Handgriff abgenommen werden (siehe Abbildung auf der Ausklappseite).

**ACHTUNG** Gelbe Verfärbungen oder Ablösung der Oberflächenbeschichtung durch falsche Reiniger!

- > Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel.
- > Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und -geräte, die für den Anwendungsbereich bestimmt sind.
- > Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der Reinigungsmittelhersteller.
- > Mischen Sie niemals Reinigungsmittel.

Für die tägliche Reinigung eignet sich eine milde Seifenlösung.

Reinigen Sie die Sitzeinheit regelmäßig bzw. sofort, wenn diese verschmutzt ist. Sichtbarer Schmutz entsteht durch zu lange Reinigungsintervalle, was zu harten Verschmutzungen führen kann.

- > Reinigen Sie WC-Sitz und Deckel mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel.
- > Wischen Sie nebelfeucht nach.
- > Lassen Sie den WC-Sitz hochgeklappt, solange sich stärkere Reinigungsmittel im WC befinden.

### 7.2 Duschstab und -kopf

#### Manuelles Reinigen von Duschstab und -kopf

Reinigen Sie den Duschstab und -kopf regelmäßig oder immer dann, wenn sie verschmutzt sind.

Eine Anleitung zum Abnehmen des Duschkopfs zur Reinigung können Sie der Abbildung auf der Ausklappseite entnehmen.